


Vivago®

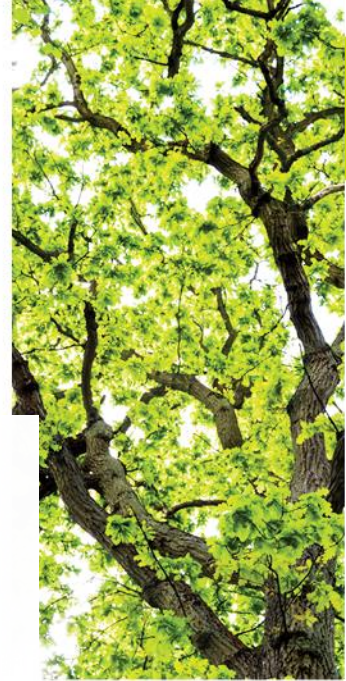

Puhelimen virransäästön
asetusten muokkaaminen
Vivago MOVE™ ja Vivago MOBILE
sovellusten käyttöä varten

V01
11.10.2019



Vivago®

Johdanto


- Tähän dokumenttiin on koottu ohjeistusta puhelinten virransäästöasetusten muokkaamiseksi Vivago MOVE™ ja Vivago MOBILE -sovellusten käyttöä varten.
- Ohjeistus kattaa seuraavat puhelinmallit dokumentin kirjoittamisen aikaan saatavilla olevilla ohjelmistoilla varustettuna:
 - Nokia 3.2
 - Samsung Galaxy A20e
 - Samsung Galaxy A40
 - Samsung Galaxy A8
 - Samsung Galaxy J6 (2018)
 - Samsung Galaxy J5 (2016)
- Huomioitavaa:
 - Dokumentin ohjeistus ja näkymät ovat esimerkkejä ja saattavat näyttää erilaisilta omassa laitteessasi, esimerkiksi puhelimen asetuksista johtuen.
 - Puhelinten asetukset saattavat vaihdella tai muuttua puhelimen käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistoversiosta toiseen.
 - Jos puhelimeen on asennettu sekä Vivago MOVE™ että Vivago MOBILE sovellus, tulee virransäästöasetukset muokata kummankin sovelluksen osalta.

Nokia 3.2


Nokia 3.2

Vaihe 1. Avaa puhelimen Asetukset-näkymä


1.1.
Pyyhkäise
näytön alaosa
ylöspäin

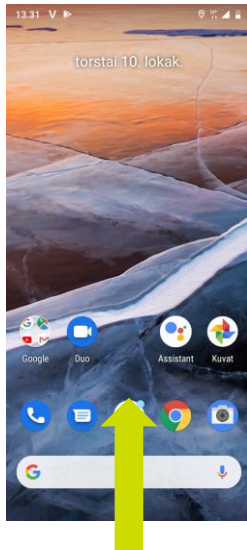

1.2.
Valitse
"Asetukset"
sovelluslistasta

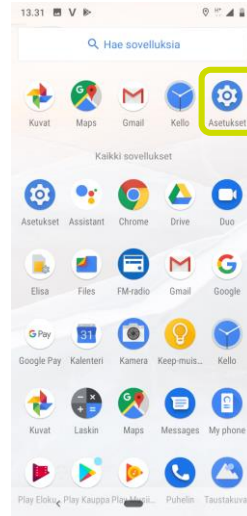

1.3. "Asetukset"
näkymä avautuu

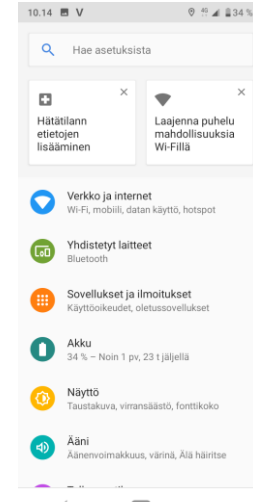


Nokia 3.2


Vivago

Vaihe 2. Muokkaa Vivago MOVE™ ja/tai MOBILE sovellusta koskevat virransäästöasetukset


2.1. Asetukset-näkymässä valitse "Sovellukset ja ilmoitukset"

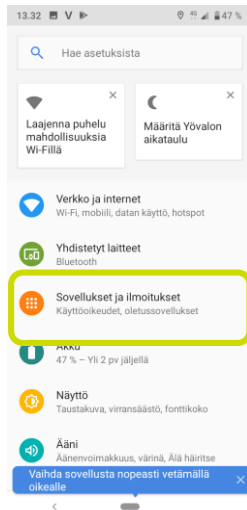


2.2. Valitse "Näytä kaikki xx sovellusta"

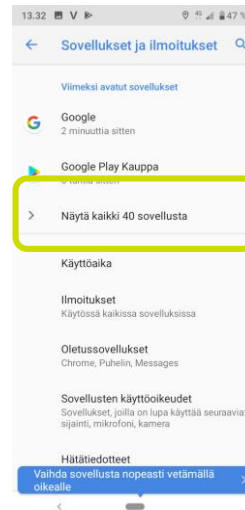


2.3. Valitse sovelluslistaa vierittämällä Vivago MOVE tai Vivago (MOBILE)

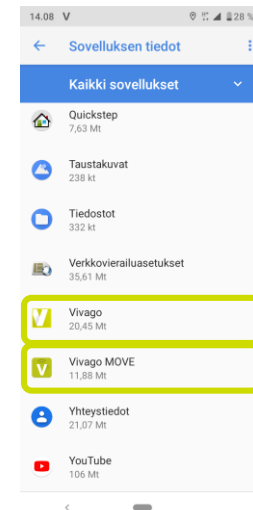

2.4. Valitse "Lisätiedot" laajentaaksesi valintoja ja sitten "Akku"

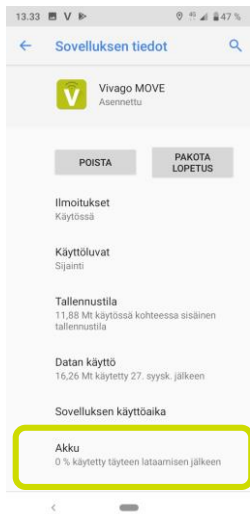


2.5. Valitse "Akun käytön optimointi"

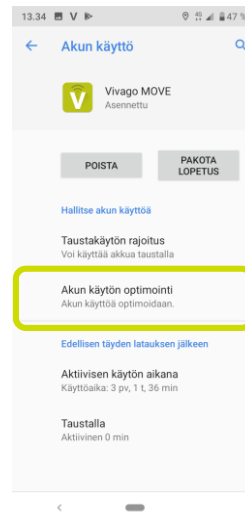


Vaihe 2. Muokkaa Vivago MOVE™ ja/tai MOBILE sovellusta koskevat virransäästöasetukset


2.6.
"Akun käytön optimointi"
näkyvässä
kosketa kohtaa
"Ei optimointia"

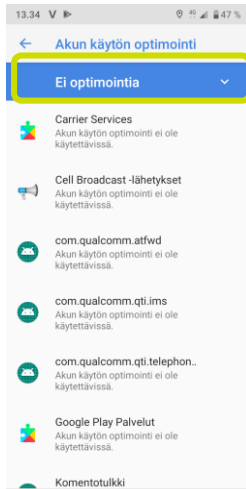


2.7.
Valitse
aukeavasta
valinnasta "Kaikki
sovellukset"

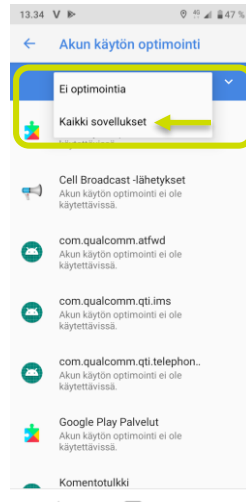

2.8.
Selaa
sovelluslistaa
alaspäin kunnes
Vivago MOVE
ja/tai Vivago
(MOBILE) tulee
näkyviin ja
valitse se

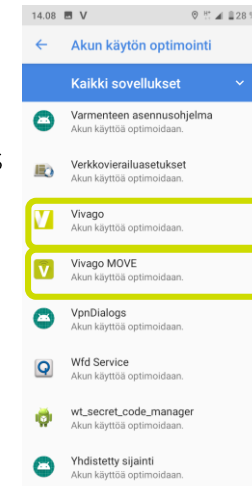


2.9.
Aukeavassa
ikkunassa aktivoi
valinta "Älä
optimoi"

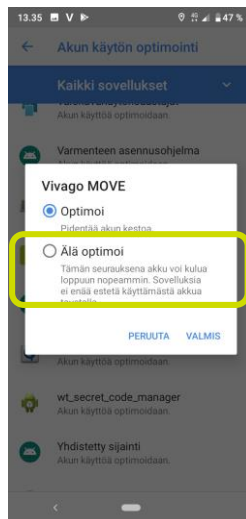


2.10.
Paina "Valmis"
ikkunan
alakulmasta

HUOM!
Jos puhelimessa on
sekä Vivago MOVE
että Vivago (MOBILE)
sovellukset pitää
vaiheet 2.8, 2.9 ja
2.10 suorittaa
kummallekin
sovellukselle erikseen

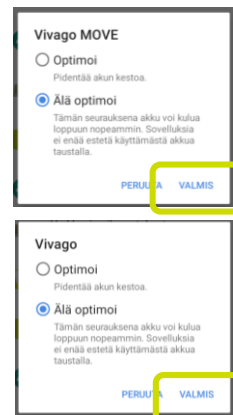

2.11.
Varmista että
sovelluksen tila
kohdassa "Akun
käytön
optimointi" on
"Ei optimointia"

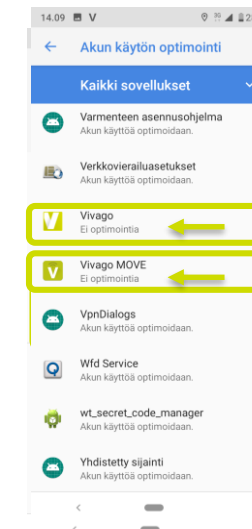


2.12.
Nyt sovelluksen
akun käytön
asetukset ovat
valmiit


Nokia 3.2

Vaihe 3. Muokkaa puhelimen virransäästöasetukset


3.1.
Asetukset-
näkyssä
Valitse "Akku"

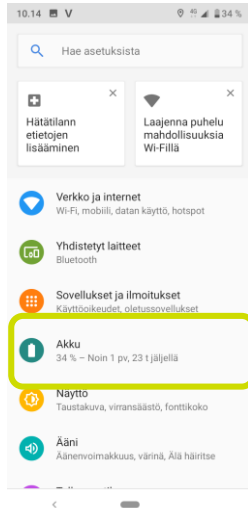

3.2.
Valitse
"Mukautuva
virta"

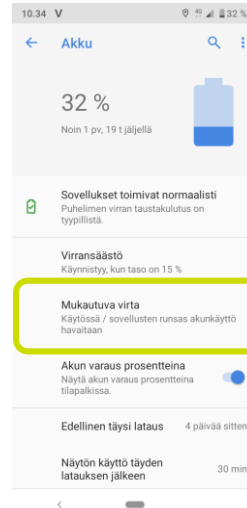

3.3.
Poista valinta
kohdasta
"Käytä
mukautuvaa
virtaa"

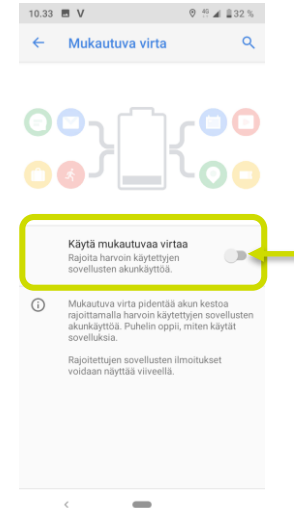

3.4.
Nyt virransäästö-
asetukset ovat
valmiit ja voit
aloittaa Vivago
MOVE™ kellon
käytön

Samsung Galaxy
A20e, A40, A8 ja J6

Samsung Galaxy A20e, A40, A8 ja J6

Vivago

Vaihe 1. Avaa puhelimen Asetukset-näkymä


1.1.
Pyyhkäise
näytön alaosa
ylöspäin



1.2.
Valitse
"Asetukset"
sovelluslistasta



1.3. "Asetukset"
näkymä avautuu

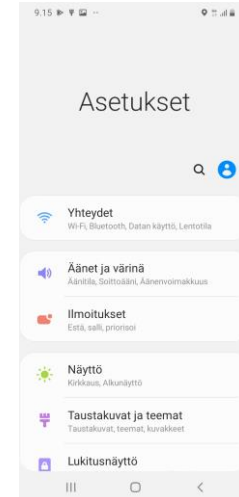


Samsung Galaxy A20e, A40, A8 ja J6


Vivago

Vaihe 2. Muokkaa Vivago MOVE™ ja/tai MOBILE sovellusta koskevat virransäästöasetukset


2.1. Asetukset-
näymässä
valitse
"Sovellukset"

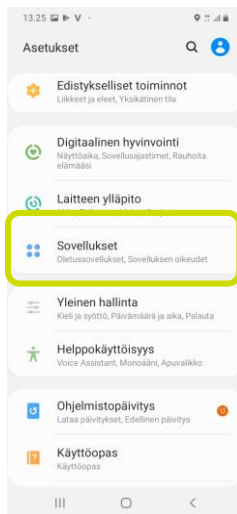


2.2. Selaa
sovelluslistaa
alaspäin kunnes
Vivago MOVE
tulee näkyviin

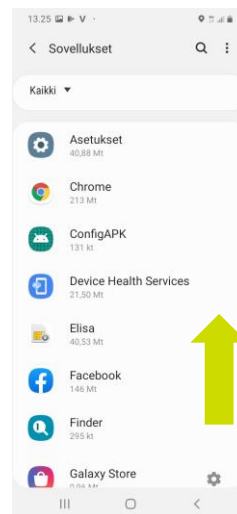


2.3. Valitse Vivago
MOVE tai Vivago
MOBILE sovellus-
listasta

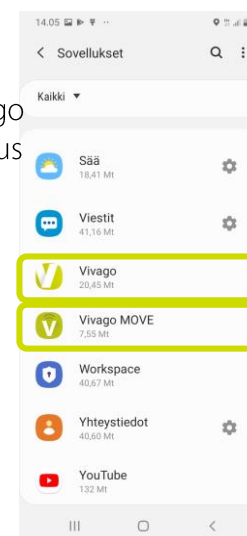

2.4. Valitse "Akku"

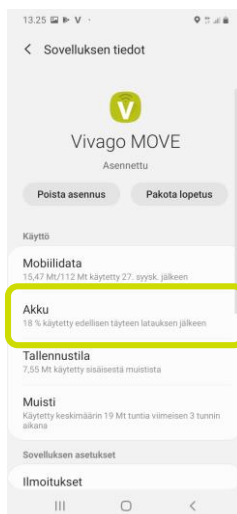

2.5. Valitse "Optimoi
akun käyttö"

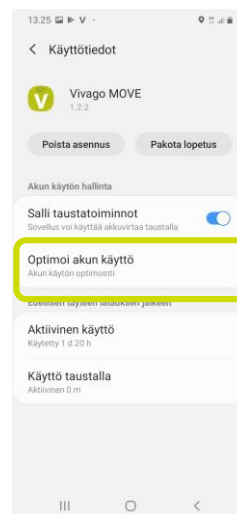


Samsung Galaxy A20e, A40, A8 ja J6


Vivago

Vaihe 2. Muokkaa Vivago MOVE™ ja/tai MOBILE sovellusta koskevat virransäästöasetukset


2.6.
"Optimoi akun käyttö"
näkyvässä
näkyvässä
kosketa kohtaa
"sovelluksia ei optimoitu"

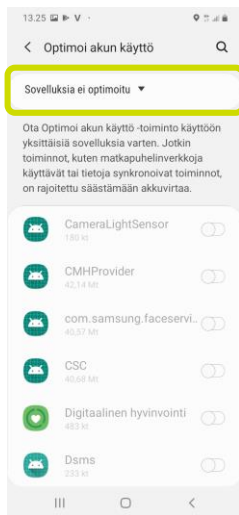


2.7.
Valitse
aukeavasta
valinnasta
"Kaikki"

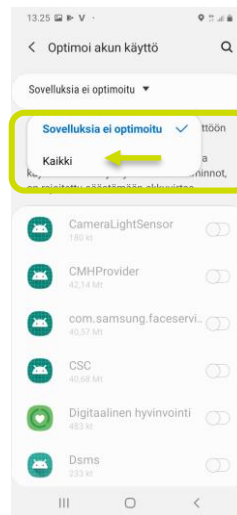


2.8.
Selaa
sovelluslistaa
alaspäin kunnes
Vivago MOVE
ja/tai Vivago
(MOBILE) tulee
näkyviin

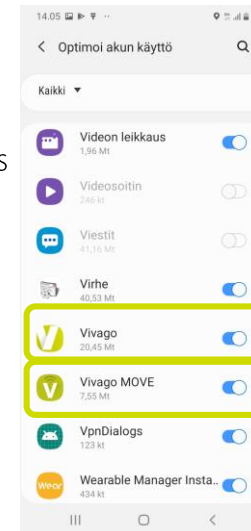

2.9.
Poista aktiivinen
valinta Vivago
MOVE ja/tai
Vivago (MOBILE)
sovelluksen
kohdalta

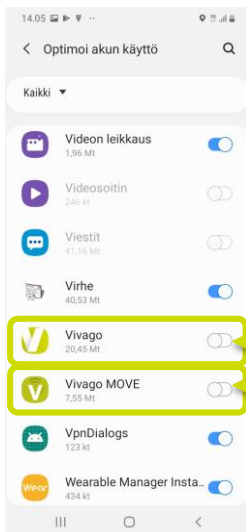

2.10.
Pala takaisin
valikkossa
koskettamalla
näytön
ylänurkan nuolta
ja varmista että
sovelluksen
"Optimoi akun
käyttö"
asetuksen tila on
"Optimoimatta"

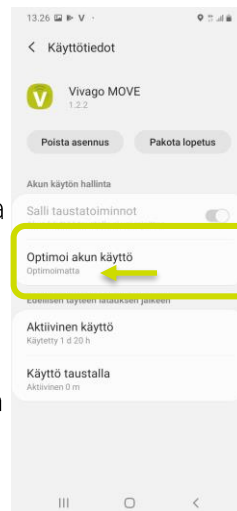


2.11.
Nyt sovelluksen akun
käytön asetukset ovat
valmiit.


Samsung Galaxy A20e, A40, A8 ja J6

Vaihe 3. Muokkaa puhelimen virransäästöasetukset


3.1.
Asetukset-
näymässä
Valitse "Laitteen
ylläpito"

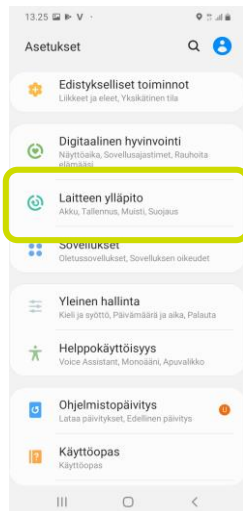


3.2.
Valitse "Akku"

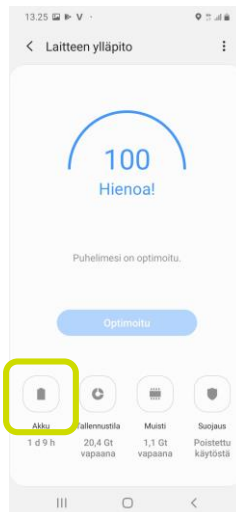

3.3.
Valitse "Virtatila"

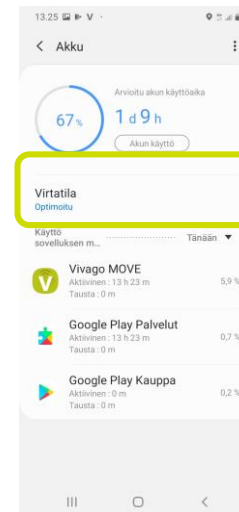

3.4.
Varmista että
valinta
"Optimoitu" on
aktiivisena ja että
"Mukautuva
virransäästö"
asetus ei ole
aktiivinen.

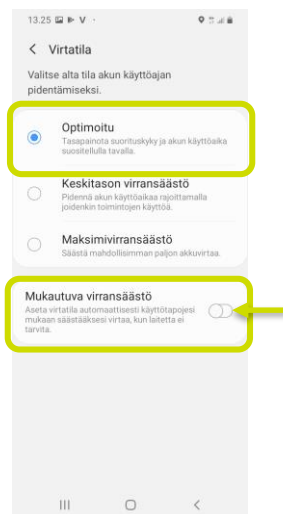


3.5.
Nyt virransäästö
asetukset ovat valmiit ja
voit aloittaa Vivago
MOVE™ kellon käytön.

Samsung Galaxy J5


Samsung Galaxy J5

Vaihe 1. Avaa puhelimen Asetukset-näkymä


1.1.
Pyyhkäise
näytön alaosasta
ylöspäin

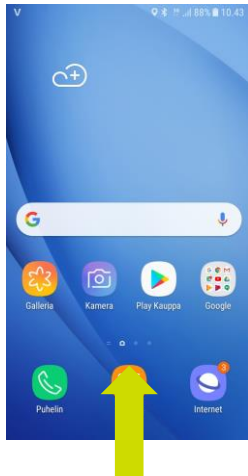

1.2.
Valitse
"Asetukset"
sovelluslistasta

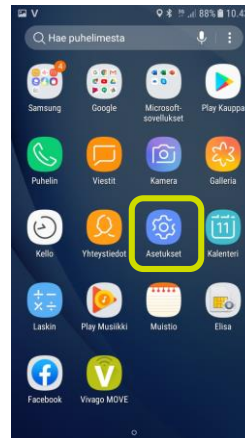

1.3. "Asetukset"
näkymä avautuu

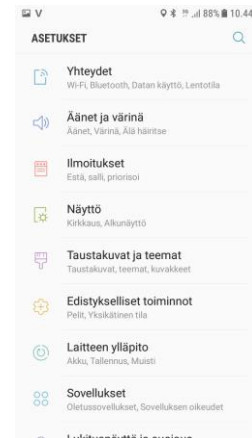


Samsung Galaxy J5

Vivago

Vaihe 2. Muokkaa puhelimen virransäästöasetukset ja lisää Vivago MOVE™ ja/tai MOBILE sovellus valvomattomien sovellusten listalle


2.1.
Asetukset-
näkyssä
Valitse "Laitteen
ylläpito"

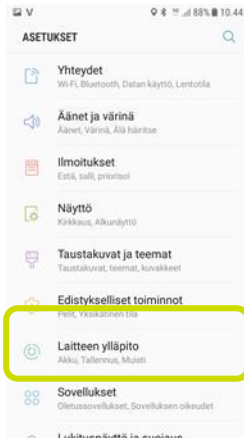


2.2.
Valitse "Akku"




2.3.
Valitse
Virransäästötilaksi "EI
KÄYTÖSSÄ"

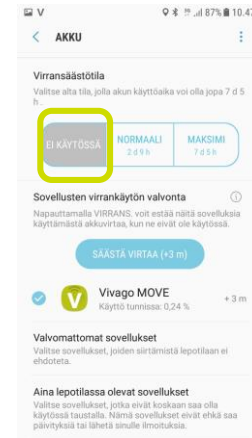


2.4.
Valitse kohta
"Valvomattomat
sovellukset".

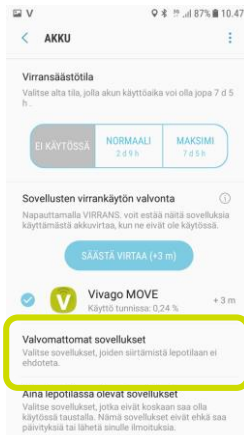

2.5.
Valitse kohta
"Lisää
sovelluksia"

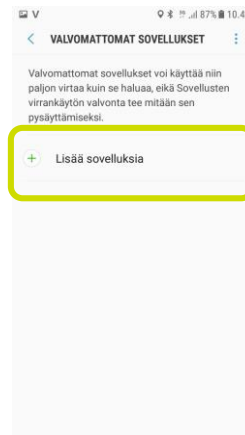


2.6.
Valitse
sovelluksista
Vivago MOVE
ja/tai Vivago
(MOBILE)
aktiivisiksi sitten
paina "Valmis"

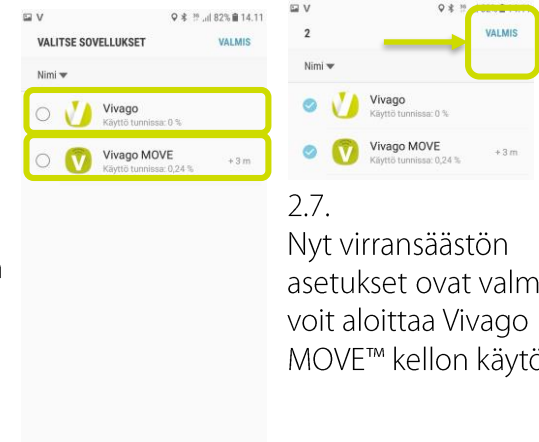

2.7.
Nyt virransäästö-
asetukset ovat valmiit ja
voit aloittaa Vivago
MOVE™ kellon käytön.

Vivago®

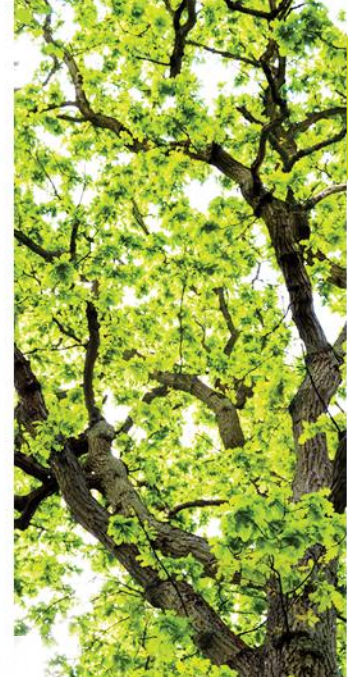

Kiitos!
www.vivago.fi



Vivago®